



DIALAB

# DIAQUICK

---

Hurtigtester

MEDIC 24

# FORDELER

- Enkel prosedyre
- Pålitelige tester
- Prisgunstige
- Visuelle avlesningstester
- Resultater innen 3 til 10 minutter
- CE - merket
- Alle tester inneholder kvalitetskontroll
- Singelpakket-tester i folie, god holdbarhet
- Prøvemateriale: fullblods, serum, plasma, urin, salivaprøver, fæcesprøver, halsavstryk, støv, planter og lignende.

# TYPER

DIAQUICK hurtigtester finnes tilgjengelig som:

## • Singelkassetter



## • Multipanel



## • Dipstick



## • Spytt- og berøringstest



## • Multikopp



# TESTPROSEDYRE



## Dipstick

Hold strimmelen ned i prøven i 10-15 sekunder. Strimmelen må ikke lengre ned enn markert, for å unngå direkte kontakt med prøve- og testområde. Plasser strimmelen på et ikke-absorberende underlag og start klokken for senere avlesning.



## Singelkassett

Plasser testkassetten på et rent og flatt underlag. Hold den medfølgende engangspipetten vertikalt og tilfør riktig mengde prøve i testbrønnen (S). Start klokken for senere avlesning.




## Multipaneler

Ta av beskyttelseshylsen på testpanelet. Dypp panelet i 10-15 sekunder i urinprøven som anvist på bildet. Plasser testpanelet på et ikke-absorberende underlag. Start klokken og vent for senere avlesning.



## Multikopper

Urinprøven tas direkte i koppen og deretter trykkes knappen ned til et lite klikk høres. Sjekk temperaturen inntil 4 minutter etter prøvetaking. En grønn farge vil indikere urinprøvens temperatur. Plasser koppen på et flatt underlag og press nøkkelen inn i koppen for å starte testen. Start klokken for senere avlesning.

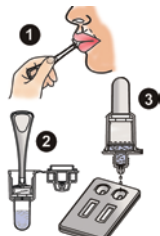

## Salivatest

Salivaprøven tas ved å føre prøvesamleren inn i munnen. Stryk innsiden av munn og tunge i 3 minutter for oppsamling av spytt. Korken på prøverøret åpnes, prøvesamleren presses godt ned, slik at salivaen blandes med reagenset. Plasser testkassetten/panelet på et flatt underlag. Skrukorken på prøverøret åpnes og 3 dråper tilsettes i prøvebrønnene. Klokken startes for senere avlesning.

# AVLESNING AV RESULTAT

DIAQUICK hurtigtester har to ulike tolkningsmuligheter.

Negativ      Positiv

## Kompetitiv metode

### Negativt resultat:

To fargede linjer er synlige. En farget linje er synlig i kontrollsonen C, og den andre i testsonen T.

### Positivt resultat:

En farget linje er synlig i kontrollsonen C, og ingen farget linje i testsonen T.

Negativ      Positiv

## Sandwich metode

### Negativt resultat:

En farget linje er synlig i kontrollsonen C, og ingen linje er synlig i testsonen T.

### Positivt resultat:

To fargede linjer synlige. En farge er synlig i kontrollsonen C, og den andre i testsonen T.

\*Alle Diaquick Drugtester har denne metoden

## ● Strep A Diaquick test

Diaquick Strep A test er en kvalitativ hurtigtest til påvisning av streptokokk A antigen i svelgavstryksprøve. Testen inneholder antistoff for Strep A for å identifisere Strep A antigen i halsprøven. Dersom prøveløsningen inneholder antigen fra gruppe A streptokokker, vil det skje en antigen-antistoff reaksjon som gir en rød testlinje i avlesningsfeltet på testkassetten. Hvert kit inneholder en positiv og negativ kontroll.



ARTIKKELNR	PRODUKT	KIT STR
Z98223CE	Strep A Diaquick kassett	20
Z98230CE	Strep A Diaquick dipstick	20

## ● FOB Diaquick test

Hurtigtest til påvisning av humant hemoglobin i fæces. Diaquick FOB er en hurtig visuell immunologisk test for kvalitativ diagnostisering av humant hemoglobin i fæces. Testen er ett hjelpemiddel i diagnostisering av sykdom i den nedre gastro intestinale (g.i) trakt. En enkel test som ikke krever diett restriksjoner for pasienten. En rask, hygienisk og luktfri test med høy sensitivitet og spesifisitet. Pasienten får utlevert ett prøveglass med bufferløsning som tilføres passende mengde fæces. Prøveglasset leveres til legekantoret som tilsetter 2 dråper av prøveløsningen i en test kassett og svaret leses av etter 5 minutter. Hvert kit inneholder en positiv kontroll.



ARTIKKELNR	PRODUKT	KIT STR
Z01101CE	FOB Diaquick kassett	25

## ● Helicobacter Pylori Diaquick test

Diaquick H.Pylori er en hurtigtest for kvalitativ bestemmelse av IgG antistoffer mot Helicobacter pylori i humant serum, plasma, fullbold eller fæces. Testen er ett hjelpemiddel i diagnostisering av H. pylori infeksjon hos pasienter med gastrointestinale symptomer. Resultatet leses av etter 10 minutter



ARTIKKELNR	PRODUKT	KIT STR
Z06229CE	H.pylori Diaquick kassett, blod	30
Z08090CE	H.pylori Diaquick kassett, fæces	20

## ● Mononukleose Diaquick test

Hurtigtest for diagnostisering av infeksjøs mononukleose for kvalitativ påvisning av mononukleose heterofile antistoffer i fullblod, serum eller plasma. Infeksjøs mononukleose er forårsaket av Epstein-Barr viruset, som er medlem av Herpesvirus familien. Symptomer er feber, sår hals og hovne lymfekjertler. I sjeldne tilfeller kan problemer med hjerte og sentralnervesystemet forekomme. Resultatet leses av etter 5 minutter.



ARTIKKELNR	PRODUKT	KIT STR
Z06620CE	Mononucleose Diaquick kassett	30
Z09630CE	Mononucleose Diaquick kassett	10

## ● Chlamydia Diaquick test

Hurtigtest for kvalitativ påvisning av Chlamydia antigen i endocervical, urethral eller urinprøve. Avleses etter 10 minutter. Chlamydia er den vanligste veneriske sykdom i verden, og kan føre til sterilitet, barnløshet og kroniske underlivssmerter.



ARTIKKELNR	PRODUKT	KIT STR
Z98226CE	Chlamydia Diaquick test	20

## ● HCG Diaquick test

Hurtigtest for kvalitativ påvisning av HCG i urin, med hensikt å påvise tidlig graviditet.

I en normal graviditet, kan HCG påvises både i serum og urin så tidlig som 7 til 10 dager etter befruktning.

HCG nivået stiger hurtig og overstiger raskt 100 IU/ml før den første uteblitte menstruasjonsperiode, og når en topp rundt 100-200 IU/ml etter 10-12 uker i graviditet. Forekomst av HCG både i urin og serum kort tid etter befruktning, og dens raske økning i konsentrasjon tidlig i svangerskapet, er en glimrende markør for tidlig påvisning av graviditet. Testen har en sensitivitet på 25 IU/ml. Resultatet leses av etter 3 minutter.



ARTIKKELNR	PRODUKT	KIT STR
Z98404CE	hCG Diaquick kassett	30
J01402-2CE	hCG Diaquick dipstick	30
Z01405CE	hCG combo Diaquick kassett	30

## ● Myoglobin/CK-MB/Troponin Diaquick test

Myoglobin, CK-MB og Troponin I er proteiner som er en del av muskulaturen. Ved vevskade, som et hjerteinfarkt er, lekker disse proteinene ut i blodet og kan påvises ved en blodprøve. Nivået av myoglobin øker målbart 2-4 timer før ett hjerteinfarkt og når toppen etter 9-12 timer, for så å returnere til normalnivå etter 24-36 timer. Utskillelsen av CK-MB i blodet ved infarkt kan detekteres innen 3-8 timer etter oppdaget symptomer, og blir normalt igjen etter 48 – 72 timer. Utskillelsesmønstre av Troponin I ligner CK-MB, men da CK-MB nivået stabiliserer seg etter 72 timer, forblir Troponin-nivået forhøyet i 6-10 dager. Minimum deteksjons nivåer er 50 ng/mL Myoglobin, 5 ng/mL CK-MB og 1 ng/mL Troponin I.

Avleses visuelt etter 10 minutter.



ARTIKKELNR	PRODUKT	KIT STR
Z05232CE	Myoglobin/CK-MB/ Troponin Diaquick Kasett	5

## ● Drugtester Diaquick

Drugtester Diaquick finnes som singel tester og multiparameter for kvalitativ deteksjon av diverse drug og/eller metabolitter i humant urin og spytt. Oversikt Drug: **AMP** - Amfetamin, **BAR**- Barbiturater, **BZO**- Benzodiazepiner, **BUP**- Buprenorfin, **COC**- Kokain, **THC**- Marihuana, **MDMA**- Ecstasy, **MTD**- Metadon, **MET**- Metamfetamin, **MOP**- Morfin, **OPI**- Opiater, **OXY**- Oxycodon, **PCP**- Pencyklidiner, **PPX**- Propoksypen, **TCA**- Tricykliske Antidepressiva.

Som standard sortiment fører Medic24 et multipanel med 6 parametere, en multikopp med 6 parametere samt en ADU-test for avdekking av manipulerte prøver.



ARTIKKELNR	PRODUKT	KIT STR
Z98907CE	Multi - 6 Drug panel Diaquick - MTD, MET, BZO, COC, MOP, THC	30
Z04590CE	ADU Diaquick test - Creat, Ni, Glut, pH, SG, Ox	25
Z06667CE	* Multi - 6 Drug kopp Diaquick - AMP, MET, BZO, COC, MOP, THC	1
Z07608CE	Multi - 5 Drug panel Diaquick - AMP, BZO, COC, THC	10

\*Multikoppen er en prøvekoppe til urin med integrerte tester.

For andre alternativer av enkelttester og paneler på urin og spytt; kontakt Medic24 eller din lokale forhandler.

Forhandler:



Medic24 as  
Storgt. 112, 6 etg  
3921 Porsgrunn

Ver. 16.02.09