

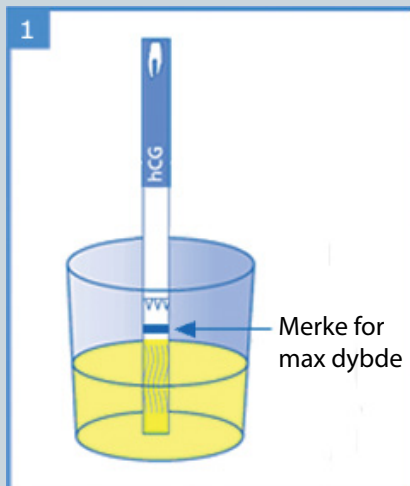


Test prosedyre Diaquick hCG dipstick

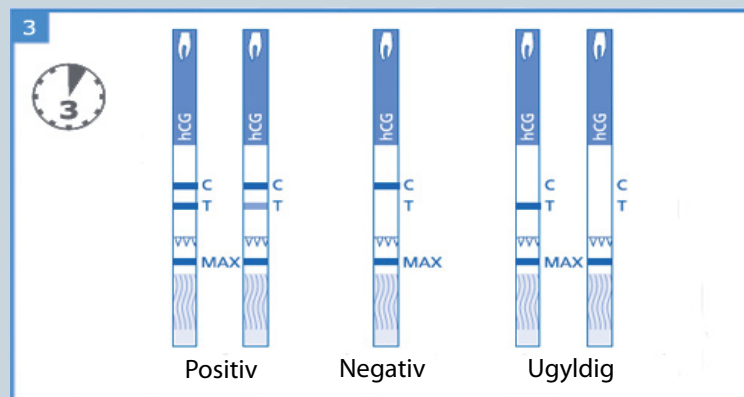

Stikk teststrimmel ned i urinprøven
10-15 sekunder.

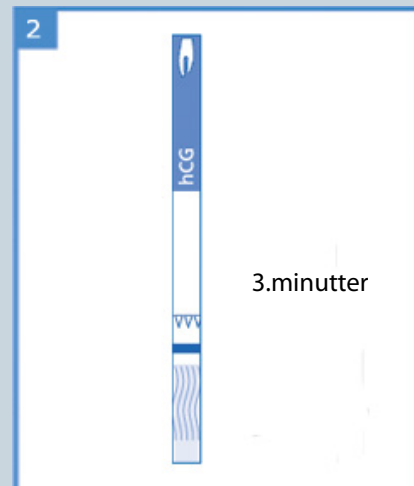

Les resultatet ved 3 minutter, men innen 5 minutter.

LAGRING:

- Diaquick hCG dipstick oppbevares i romtemperatur eller kjøleskap.
- Dersom de oppbevares i kjøleskap må de ha romtemperatur før bruk.
- Strimlene må oppbevares i aluminiumsfolien inntil de benyttes.

Vær oppmerksom på at dette er en hurtigguide. Varens pakningsvedlegg fra produsent bør leses.