

Quo-test HbA1c kontroller



Quo-Test HbA1c kontrollkit inneholder 4 kontroller: 2 i normal nivå og 2 i abnormal nivå. Forventede verdier finner du i pakningsvedlegget i kontrollpakningen. Les gjerne strekkoden til riktig kontroll innen analysering.

Klargjøring av kontroll

- Før bruk må den frysetørkede kontrollen rekonstitueres. Tilsett 6 dråper av rekonstitusjonsløsning på kontrollen. Skru på lokket og la stå i 15 minutter.
- Bland kontrollen ved å rulle kontrollen mellom hendene, evt. rist forsiktig for å sørge at kontrollen løses opp. La stå ytterligere 15 minutter før bruk.
- Sett på dråpetelleren på flasken. Kontrolløsningen er nå ferdig til bruk.
- Kontrolløsningen skal oppbevares i kjøleskap.
- Rekonstituert kontroll er holdbar i 15 dager. Ved analysering 1 gang i uken kan løsningen brukes 3 ganger.

Analysering av kontroll

- Ta kontrollen ut av kjøleskapet og bland kontrollen ved å rulle mellom hendene, evt. rist forsiktig. Se til at løsningen er i flasken og ikke i dråpetelleren. **NB!** Kontrollen kan brukes rett fra kjøleskapet.
- Ta frem strekkodekortet som kom med kontrollkitet og les strekkoden til det nivået som skal analyseres.
- Trekk noe kontrolløsning med dråpetelleren og plasser en dråpe på et plastbrett som følger med kontrollkitet eller på en annen ikke-absorberende overflate. Se til at du tømmer kontrolløsningen fra dråpetelleren i flasken igjen. Gjennomfør analysering som vanlig.
- Sett kontrollen i kjøleskapet med en gang.